

PANSEMENT HEMOSTATIQUE

NUSTAT TACTICAL



Le pansement NuStat® Tactical permet de contrôler un saignement rapidement afin de stabiliser le patient pour le transporter.

QU'EST-CE-QUE LE NUSTAT® TACTICAL ?

Le NuStat® Tactical est un mélange de fibres hémostatiques non imprégnées à base de cellulose et de silice. La cellulose est idéale pour la coagulation, car elle absorbe le sang et favorise une concentration localisée de plaquette. Les fibres à base de silice imitent les ions négatifs sécrétés par les plaquettes, ce qui améliore encore plus le processus de coagulation.

EN QUOI NUSTAT® TACTICAL EST-IL DIFFERENT ?

Les fibres hémostatiques du pansement NuStat® Tactical ne contiennent pas de résidus ou de pellicules biologiques pour activer le processus de coagulation. Le NuStat Tactical ne nécessite aucune préparation. Il est durable, absorbant et facile à appliquer. Le NuStat Tactical ne perd pas son mécanisme hémostatique en présence de saignement. Il ne contient pas de protéines animales ni de latex.

COMMENT EST CONDITIONNE NUSTAT® TACTICAL ?

Le NuStat® Tactical est conditionné dans une pochette hermétique, facile à ouvrir, étanche et durable. Le pansement en lui-même est plié en accordéon. L'emballage est extrêmement compact.

Bâtiment Le Diaph - 13 rue François Le Toullec - 56100 Lorient

Tél : +33 (0)2 97 80 10 40 - www.pc-equipment.fr



REFERENCE ET INFORMATION POUR VOS COMMANDES

Taille	Nombre de pansements par boîte	Référence
5x91 cm	10	5-0236

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

1. Ouvrez l'emballage et sortez le NuStat® Tactical.
2. Posez le NuStat® Tactical directement sur la blessure.
3. Appliquez une pression ferme afin que le NuStat® Tactical soit en contact direct avec la zone de saignement.
4. Maintenez la pression. Si le saignement continue appliquez un nouveau NuStat® Tactical en suivant les instructions données plus haut.

INDICATIONS :

Le NuStat® Tactical est un pansement hémostatique à usage unique. Il doit être appliqué en externe, en maintenant une pression mécanique afin de contrôler temporairement les saignements en cas de lacération, d'abrasion, d'incision et de perforation.

Bâtiment Le Diaph - 13 rue François Le Toullec - 56100 Lorient

Tél : +33 (0)2 97 80 10 40 - www.pc-equipment.fr

